

Кимба Нео

Лучшее для жизни



Quality for life

Информация для родителей и специалистов

Фирменная группа ОТТО БОКК

143441, Московская область, Красногорский район,
д. Путилково, участок 69 км МКАД, бизнес-парк «Гринвуд», строение 7
тел.: +7 (495) 564-83-60 · факс: +7 (495) 564-83-63
info@ottobock.ru · www.ottobock.ru



Лучшее для жизни Новая Кимба Нео

Родители стремятся дать своим детям только самое лучшее. Коляска для детей с двигательными нарушениями должна удовлетворять потребности ребенка и семьи, создавать условия для оптимальной поддержки, иметь настройки, позволяющие её использовать в течение нескольких лет, и в то же время, она должна выглядеть как обычная прогулочная коляска. Этим требованиям полностью соответствует новая Кимба Нео.

Кимба Нео объединяет в себе максимальную функциональность, соответствие высочайшим эстетическим критериям, а также дает возможность производить разнообразные индивидуальные настройки. Благодаря тому, что во время сидения в коляске ребенок стабилен, он/она может активно исследовать окружение и тренировать двигательные навыки. Родители смогут легко подстроить Кимбу Нео под потребности ребенка путем проведения определенных регулировок. Мы осознаем важность простоты использования.

Преимущества новой Кимбы Нео

- Функциональность, элегантность и комфорт
- Амортизация во время езды
- Дышащая мягкая обшивка
- Стабильная поза как средство терапии
- Индивидуальные настройки
- Сиденье располагается по/против хода движения
- Простота использования
- Большой выбор аксессуаров





Функциональность

Кимба Нео подходит любому ребенку

Каждый ребенок имеет свои особенности. Вот почему кресло Кимбы Нео сконструировано таким образом, чтобы его можно было подстроить под индивидуальные потребности Вашего малыша. После того, как произведены основные настройки кресла, и достигнута оптимальная поза, дальнейшие регулировки производятся в несколько простых движений. В том числе, можно изменить степень жесткости амортизаторов, чтобы создать ребенку ощущение защищенности и безопасности. В Кимбе Нео Ваш ребенок будет

сидеть в комфортной и стабильной позе, которая обеспечивает поддержку и создает условия для его активности.

Индивидуальные настройки

- Ширина и глубина сиденья
- Длина подножки
- Высота спинки
- Угол наклона сиденья, спинки, подножки
- Поддержки грудного отдела и головы
- Амортизация

Терапевтические эффекты

1 Многофункциональное сиденье

Таз и туловище не съезжают вниз, поддерживается их стабильность.

Это обеспечивает:

- Повышение активности
- Тренировку двигательных навыков
- Поддержку спины
- Больше свободы движений в области туловища и верхних конечностей
- Нормализацию мышечного тонуса у детей с тенденцией к его повышению

2 Подножка с регулировкой угла наклона

Правильное сидение начинается с положения ног. Подножка Кимбы Нео обеспечивает:

- Наилучшую основу для правильного сиденья
- Позитивное влияние на мышечный тонус
- Профилактику деформации стопы
- Возможность использования ремешков для фиксации стоп

3 Амортизация рамы

Прогулка с Кимбой Нео легкая и комфортная благодаря благодаря амортизаторам, регулируемым в соответствии с весом пользователя. Амортизаторы обеспечивают:

- Оптимальную поддержку для детей с повышенным мышечным тонусом
- Мягкий ход
- Легкое управление коляской по неровным поверхностям



Многообразие на пользу

Кимба Нео удобна в любой ситуации



Ни один ребенок не может сидеть долго в одном и том же положении. Особенно это касается детей с двигательными ограничениями. Нарушение контроля за положением туловища и таза еще более усугубляет ситуацию.

Кимба Нео дает возможность родителям легко менять позу ребенка из активного положения в более пассивное - для отдыха и сна. Благодаря плавным регулировкам изменение угла наклона кресла можно выполнить одной рукой также, как и изменение наклона спинки. На время сна Вы можете полностью откинуть спинку кресла назад.



Терапевтические эффекты

Изменение угла наклона кресла

- Положение отдыха снижает нагрузку на позвоночник
- Активное положение стимулирует мышцы туловища
- Все установленные ранее настройки сохраняются во время наклона сиденья

Плавное отклонение спинки

- Регулировка спинки в соответствии с потребностями ребенка
- Плавное изменение угла сгибания в коленных и тазобедренных суставах в зависимости от наклона спинки
- Изменение угла наклона более или менее 90 градусов.

Горизонтальное положение

- Использование коляски во время сна
- Отклонение спинки и подножки, позволяющее ребенку находиться в положении лежа
- Использование горизонтального положения для смены подгузников





В любой жизненной ситуации В контакте с ребенком

Дети с судорожными приступами должны всегда быть под присмотром. Кресло Кимбы Нео может быть установлено таким образом, чтобы ребенок находился лицом к родителям. В первое время многие бабушки и дедушки чувствуют себя неуверенно во время прогулки, и они рады возможности видеть любимого внука или внучку, сидящего напротив.

Аксессуары для комфорта
Даже когда идет дождь, родители или другие сопровождающие всегда могут видеть ребенка благодаря окошку в крыше. Если погода хорошая, можно прикрепить к коляске столик (серый или прозрачный). Наличие столика не только улучшает двигательную активность ребенка, это место, куда можно положить игрушки.



Терапевтические эффекты

Установка кресла (по ходу или против хода движения коляски)


- Дети всегда под наблюдением
- Быстрая реакция на судорожный приступ
- Беспокойные дети всегда в контакте с родителями
- Беспокойные бабушки и дедушки всегда в контакте с ребенком

Столик

- Легко установить и снять
- Стимулирует разгибание рук
- Облегчает выпрямление тела
- Игрушки не упадут и не потеряются


Это легко

Кратко о Кимбе Нео

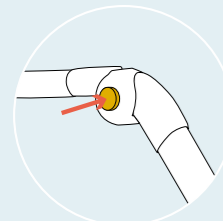


Изменение высоты ручки для сопровождающего лица

Нажмите на кнопки шарнирного механизма и установите ручку в необходимое положение.

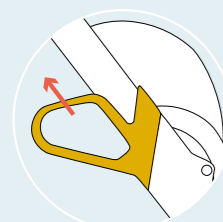


Складывание коляски

Кресло и все установленные элементы остаются на раме. Освободите фиксатор и сложите коляску, все манипуляции можно выполнять одной рукой. Затем, просто положите коляску в багажник машины.

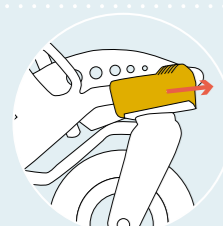


Фиксатор вращающихся колес

Потяните фиксатор рукой или ногой и переместите его. Рулевой механизм вращающихся колес автоматически защелкнется в необходимом положении. Для того, чтобы освободить механизм, нажмите на фиксатор.

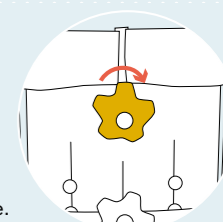


Регулировка наклона сиденья

Поверните верхнюю круглую ручку, расположенную на спинке сиденья, вправо и установите наклон сиденья, необходимый ребенку в данный момент. Позвольте механизму зафиксировать данное положение. Все настройки сохранены. Ваш ребенок отдыхает, и снижена нагрузка на его позвоночник.

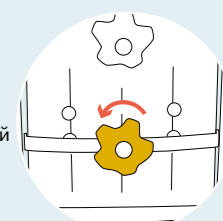


Регулировка угла наклона спинки

Поверните нижнюю ручку влево, пока спинка не начнет свободно двигаться. Выберите необходимый угол наклона и закрутите ручку фиксатора обратно.

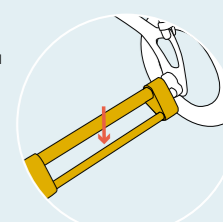

Тормоз

В то время, когда Вы сажаете или достаете ребенка из коляски, очень важно, чтобы она стояла на тормозе. Для активации тормоза нажмите на рычаг.

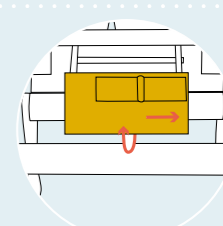


Снятие кресла с шасси/ Изменение положения кресла

Для изменения положения кресла по ходу или против хода движения необходимо его снять, отодвинув предохранитель страховочного устройства, затем поднять сиденье. Установить, развернув сиденье в нужном направлении.

Оптимальна в любой ситуации

Готова к любым непредвиденным обстоятельствам

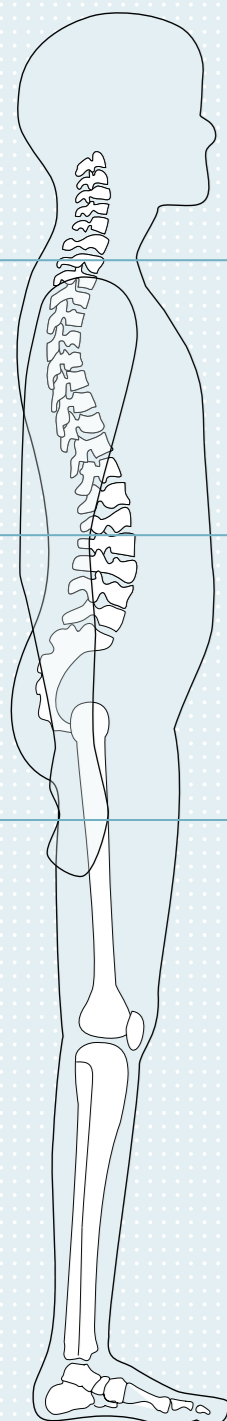

Подголовник/поддержки

- Плавные регулировки высоты и ширины
- Мягкая обшивка
- Чехлы подлежат стирке

Боковые поддержки туловища

- Плавные регулировки высоты и ширины
- Поддержка туловища в стабильном положении
- Помощь в поддержании вертикальной позы
- Стимуляция двигательной активности рук
- Чехлы подлежат стирке

Боковые ограничители сиденья

- Плавные регулировки ширины и глубины сиденья
- Поддержка таза и туловища в стабильном положении
- Чехлы подлежат стирке

Абдуктор

- Регулировка положения
- Функция разведения бедер
- Два размера
- Чехол подлежит стирке

Подножка

- Регулировка угла наклона
- Регулировка высоты
- Возможность поднять



Фиксатор грудного отдела «майка»



Ремень для фиксации таза

Цвета, опции и размеры



Обшивка: мягкая и привлекательная – то, что нужно детям

Новая обшивка Кимбы Нео не только выглядит очень привлекательно, но и выполняет терапевтические функции. Она стабилизирует Вашего ребенка именно там, где ему требуется поддержка. Благодаря тому, что обшивка и поддержки сделаны из приятного на ощупь материала, Ваш ребенок будет чувствовать себя в коляске уютно и безопасно.

Прогулочное шасси	Размер 1	Многофункциональное кресло	Размер 1
Общая ширина	60 см	Ширина сиденья	19–31 см
Диаметр передних колес	17 см	Глубина сиденья	20–30 см
Диаметр задних колес	28 см	Высота спинки	41–61 см
Высота ручки для сопровождающего лица (мин./макс.)	71/116 см	Изменение угла наклона спинки	80°–180°
Наклон сиденья (мин./макс.)	-10°/+35°	Высота прорезей для ремней (плечи), мин./макс.	30/45 см
Грузоподъемность	50 кг	Высота подножки	19–31 см
Вес шасси	10,5 кг	Макс. вес пользователя	35 кг
Размер в сложенном состоянии без сиденья (ДхШхВ)	79 x 60 x 46 см	Вес кресла	7,5 кг
Мин. размер в сложенном состоянии сиденье по ходу движения	90 x 60 x 53 см	Размер в сложенном состоянии с боковыми поддержками (ДхШхВ)	58 x 37 x 42 см
Возраст	1–6 лет	Возраст	1–6 лет
		Стандартная обшивка	Дышащий материал
		Опционально	Микрофибра Меланж

Стандартная обшивка



Коричневый/бежевый

Зеленый/бежевый

Микрофибра Меланж



Черничный/серый

Голубой/коричневый

Салатовый/коричневый

Цвет рамы



Серебристый металлик



Черный матовый


Аксессуары



Крыша от дождя и солнца




Ручка-ограничитель

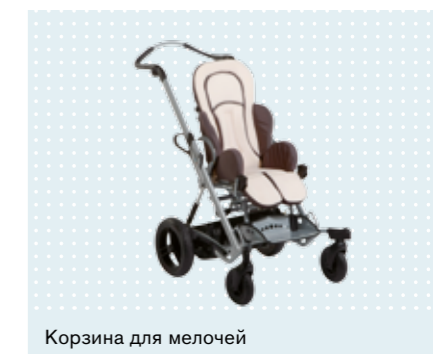

Корзина для мелочей



Столик серый

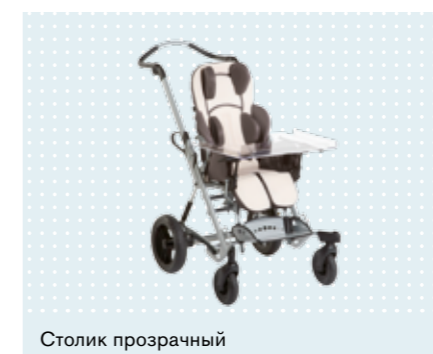

Столик прозрачный